

Abgeschirmtes Gleichstromkabel

DREAMSTATION

SYSTEM ONE SERIE 60


PHILIPS

RESPIRONICS

Dieses Zubehörteil kann für den Betrieb der CPAP- und BiPAP-Systeme von Philips Respironics verwendet werden, wenn kein Wechselstrom verfügbar ist. Das Adapterende des abgeschirmten Gleichstromkabels wird an einen standardmäßigen 12-V-Gleichstromausgang, wie er in Kraftfahrzeugen zu finden ist, oder an die Buchse des Philips Respironics Akkus angeschlossen oder kann über das Gleichstrom-Batterieadapterkabel von Philips Respironics mit den Anschlüssen eines separaten externen Akkus verbunden werden. Wenn Sie den tragbaren Akku oder das Gleichstrom-Batterieadapterkabel von Philips Respironics verwenden, beachten Sie die diesen Zubehörteilen beiliegenden zusätzlichen Anweisungen zur Einrichtung.

Vorsichtshinweise

- Das abgeschirmte Gleichstromkabel ist für die Verwendung mit „positiv spannungsführenden“ elektrischen Systemen mit 12 Volt bestimmt. Diese Systeme werden auch als „negativ geerdet“ bezeichnet. Wenn Sie sich über die Polarität des elektrischen Systems nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughersteller. Die Verwendung von „negativ spannungsführenden“ elektrischen Systemen mit 12 Volt kann sowohl das Gerät als auch das elektrische System des Fahrzeugs beschädigen.
- Trennen Sie die Verbindung des Gleichstromkabels mit Ihrem Fahrzeug, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Stammt der Gleichstrom von einer Fahrzeugbatterie, sollte das Gerät nicht verwendet werden, solange der Fahrzeugmotor läuft. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Überprüfen Sie elektrische Kabel und Leitungen regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden und austauschen.

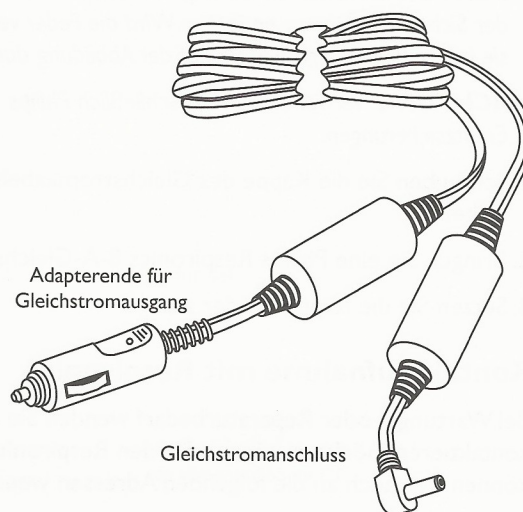

Zusätzliche Warnungen und Sicherheitshinweise finden Sie in den Anweisungen des Philips Respironics tragbaren Akkus oder des Gleichstrom-Batterieadapterkabels.

Hinweis: Das Anschlussende des Gleichstromkabels ist so gefertigt, dass das Äußere des Gehäuses geerdet und das Innere positiv ist. Das Netzstromadapterende des Kabels ist so gefertigt, dass der Stift in der Mitte positiv und der äußere Stecker geerdet ist.

Packungsinhalt

Die Packung enthält: ein abgeschirmtes Gleichstromkabel mit einer integrierten 8-A-Sicherung, zwei Ersatzsicherungen (8 A) und dieses Merkblatt.

Anweisungen zur Verwendung mit einer Fahrzeugbatterie

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen Kapazitäten von Fahrzeugbatterien müssen Sie für jeden Fall individuell ermitteln, wie lange das Therapiegerät mithilfe der Batterie betrieben werden kann. Zudem müssen Sie sich vergewissern, dass Ihre Batterie ausreichend geladen ist, um auch Ihr Fahrzeug später wieder betreiben zu können. Informationen zu Batteriekapazität und maximaler Entladung finden Sie im Handbuch zu Ihrem Fahrzeug und/oder erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Fahrzeugbatterie. Die maximale Stromaufnahme Ihres Therapiegeräts bei Betrieb mit Gleichstrom ist auf der Unterseite des Geräts aufgeführt.

1. Schalten Sie Ihr Therapiegerät AUS.
2. Trennen Sie das Therapiegerät von der externen Stromquelle.
3. Schalten Sie das Fahrzeug AUS.
4. Verbinden Sie das Anschlussende des Gleichstromkabels mit dem Gleichstromanschluss des Philips Respironics Therapiegeräts.
5. Verbinden Sie das Adapterende des Gleichstromkabels mit dem 12-V-Gleichstromausgang Ihres Fahrzeugs. Die LED-Leuchte des Kabels leuchtet bei einer korrekten Verbindung auf.
6. Schalten Sie das Therapiegerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung funktioniert.




Anweisungen für das Auswechseln der Sicherung

Das abgeschirmte Gleichstromkabel wird mit einer integrierten 8-A-Sicherung geliefert. Für den Fall, dass diese Sicherung ausgewechselt werden muss, sind 2 Ersatzsicherungen im Lieferumfang inbegriffen. Befolgen Sie die Anweisungen unten, um eine Ersatzsicherung zu installieren.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, die Feder in der Sicherungshalterung bei Auswechseln der Sicherung nicht zu entfernen. Wird die Feder versehentlich entnommen, fügen Sie sie in der Reihenfolge, wie sie auf der Abbildung dargestellt ist, wieder ein.

ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Philips Respironics 8-A-Gleichstrom-Ersatzsicherungen.

1. Schrauben Sie die Kappe des Gleichstromkabels ab und entfernen Sie die Sicherung.
2. Bringen Sie eine Philips Respironics 8-A-Gleichstrom-Ersatzsicherung an.
3. Setzen Sie die Kappe wieder auf.

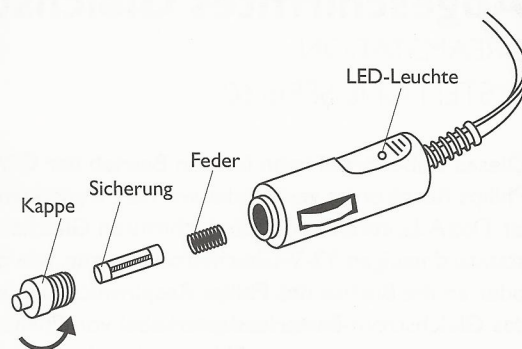

Kontaktaufnahme mit Respironics

Bei Wartungs- oder Reparaturbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren medizintechnischen Betreuer. Falls Sie Respironics direkt kontaktieren möchten, können Sie den Respironics-Kundendienst unter +1-724-387-4000 oder +49 8152 93060 erreichen. Sie können sich auch an die folgenden Adressen wenden:

Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, Vereinigte Staaten

Respironics Deutschland
Gewerbstraße 17
82211 Herrsching, Deutschland

Nachbestellung

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
1099010	Gleichstromkabel-Ersatzsicherung, 8 A
1120746	Abgeschirmtes Gleichstromkabel – DreamStation
1097568	Abgeschirmtes Gleichstromkabel – System One Serie 60
1028869	Tragbarer Akku
532209	Gleichstrom-Batterieadapterkabel

Hergestellt für:

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 Vereinigte Staaten

Respironics Deutschland
Gewerbstrasse 17
82211 Herrsching, Deutschland



EC REP

Deutsch