


Komponentenkarte für AirFit P10

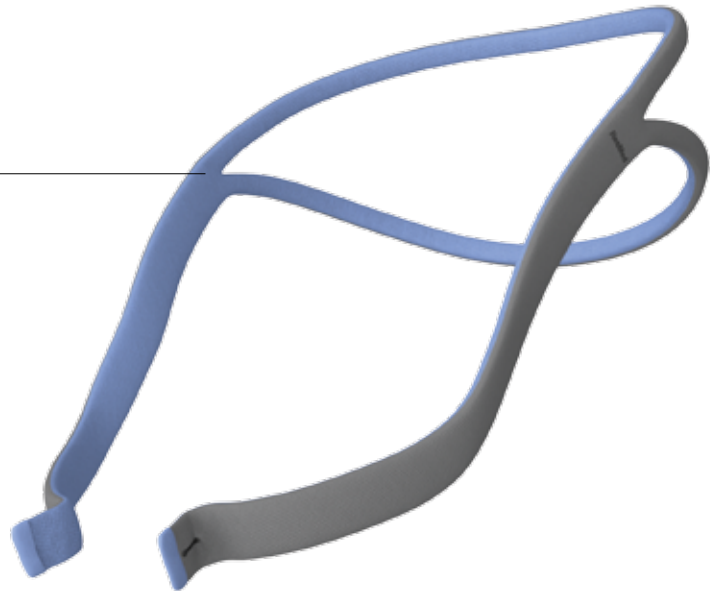

AirFit P10
Flexibles Doppelkopfband
62935 Standard

AirFit P10 *for Her*
Flexibles Doppelkopfband
62936 Small




Rahmen
62938



Nur 3 Komponenten

machen die AirFit P10
um ca. 50 % leichter als die
führende Nasenpolstermaske
Swift FX von ResMed.

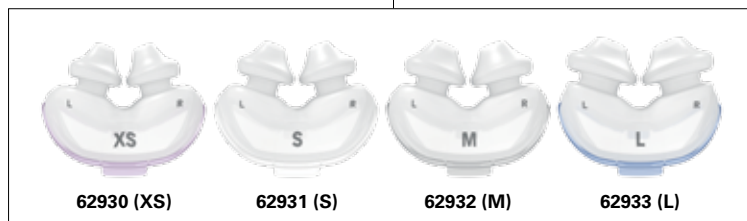

62930 (XS)

62931 (S)

62932 (M)

62933 (L)

- XS** Extra Small
- S** Small
- M** Medium
- L** Large

Artikelnummern Maskensystem

AirFit P10* **62901**

AirFit P10 *for Her*** **62911**

* Die Maske wird mit Nasenpolstern der Größen S, M und L geliefert.

** Die Maske wird mit Nasenpolstern der Größen XS, S und M geliefert.


Anleitung zum Anlegen der AirFit P10 Nasenpolstermaske




- Halten Sie die Nasenpolster an Ihre Nase. Die Anzeigen für links (L) und rechts (R) müssen auf der jeweils richtigen Seite sein, die Anzeige für die Nasenpolstergröße (z. B. M) weist nach unten.



- Ziehen Sie das untere Band über den Hinterkopf.
- Das obere Band sollte bequem auf Ihrem Kopf sitzen.

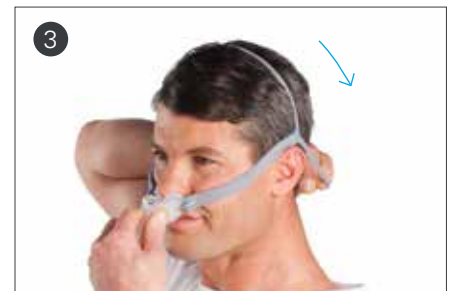



- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf, indem Sie es am unteren Band festhalten.

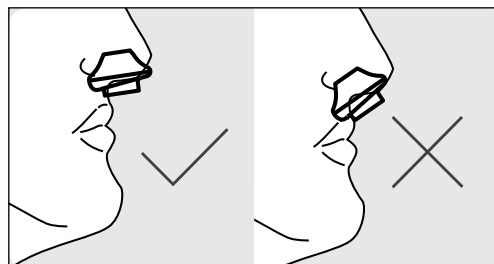

- Ziehen Sie die Maske vom Gesicht weg und setzen Sie sie wieder auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Nasenposter aufrecht und fest an den Nasenlöchern anliegen.



- Verbinden Sie dann das Ende des Maskenschlauchs mit dem Atemschlauch des Geräts und schalten Sie dieses ein.
- Sie können Ihre Maske jetzt verwenden.

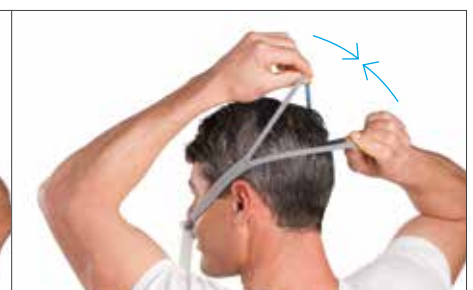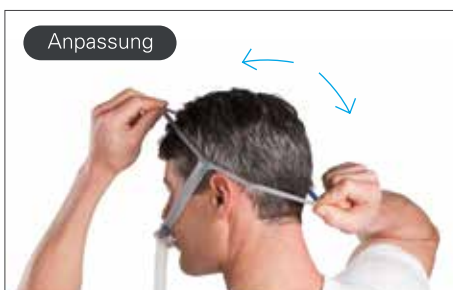

- Für einen optimalen Tragekomfort können Sie das Kopfband einfach anpassen, indem Sie die Bänder zum Lockern auseinander oder zum Festziehen zueinander ziehen.

Ausführliche Informationen und Anleitungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung für AirFit P10.