



- ① Krümmer
- ② Mundstück mit Ventilschlauch
- ③ Schalldämpfer
- ④ Trocknungsspatel
- ⑤ Einführhilfe

## Anwendung




1. Nehmen Sie das RC-Cornet® (Basiscornet) in den Mund und umschließen Sie das Mundstück mit den Lippen (Abb. 1). Nicht darauf beißen!
2. Atmen Sie durch die Nase langsam und tief ein und blasen Sie durch das RC-Cornet® langsam und tief aus. Wiederholen Sie den Vorgang einige Male und gewöhnen Sie sich an diese Atemtechnik.
3. Benutzen Sie das RC-Cornet® mind. dreimal täglich ca. 2 - 5 Minuten sowie immer, wenn Sie eine Verschleimung verspüren.



## Einstellungen

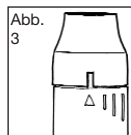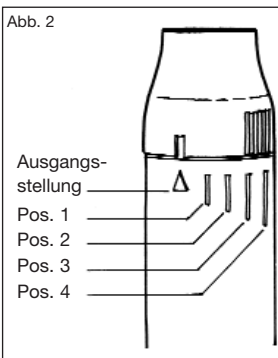

4. Patienten mit COPD, Lungenemphysem und Asthma benutzen das RC-Cornet® in der Ausgangsstellung (Abb. 3) sowie in den Positionen 1 und 2 (Abb. 4), die durch Drehen des Mundstückes eingestellt werden.

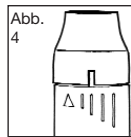


5. Patienten mit Bronchiektasie, sehr zähem Schleim und Mukoviszidose stellen durch Drehen des Mundstückes die Positionen 3 und 4 ein (Abb. 5).

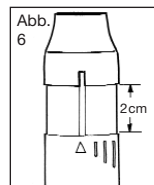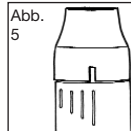


**Hinweis!** Patienten mit schwacher Atemmuskulatur ziehen das Mundstück in der Ausgangsstellung um 2 cm heraus und senken so den Druck, bei dem das RC-Cornet® zu arbeiten beginnt, von 10 auf nur 2 cmWS (Abb. 6).

## Reinigung

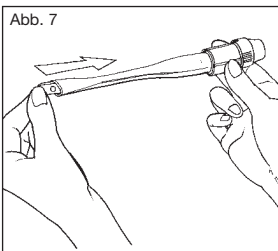


6. Ziehen Sie das Mundstück mit dem Ventilschlauch aus dem Krümmer und führen Sie den Trocknungsspatel in den Schlauch ein (Abb. 7). **Wichtig!** Während des gesamten Reinigungsvorgangs muss der Trocknungsspatel den Ventilschlauch geöffnet halten, um ein Verkleben des Schlauches zu vermeiden.
  - a) **für den Patienten:** alle Teile können mit der Hand, in der Spülmaschine oder im Vaporisator gereinigt werden. Bei regelmäßiger Anwendung reinigen Sie das Gerät zweimal pro Woche.
  - b) **für die Klinik:** alle Teile können mit Heißdampf sterilisiert werden, Temperatur 121 °C bzw. kurzzeitig 134 °C.






## Zusammenstecken des RC-Cornet®

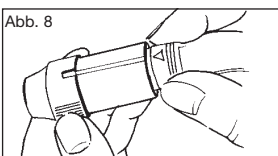

7. Falls Sie den Schlauch vom Mundstück abgezogen haben, ziehen Sie den Ventilschlauch nun wieder auf (Abb. 8). Die Kerbe des Mundstücks soll dabei die Mitte der Schlauchbreite anzeigen (Abb. 9).

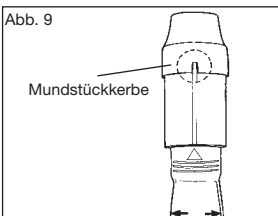

**Der Schlauch darf nicht gestaucht im Krümmer liegen (Abb. 10), deshalb sollten Sie immer die Einführhilfe zum Einführen des Schlauches mit Mundstück in den Krümmer benutzen (Abb. 11 bis 14).**

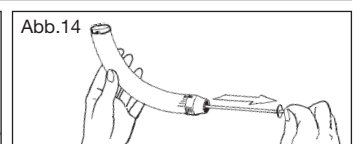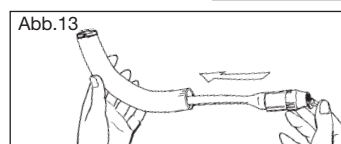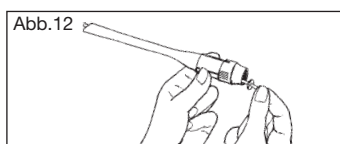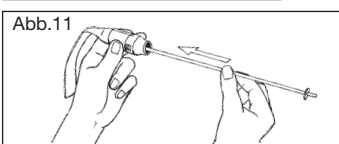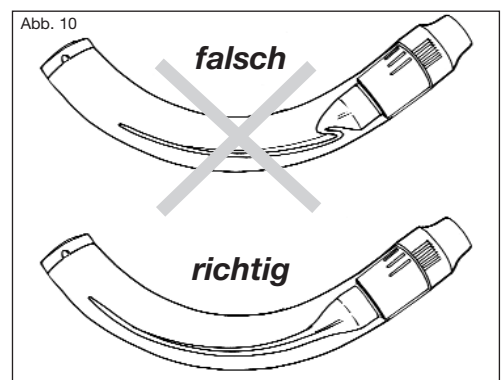

Bei Bedarf lesen Sie bitte die ausführliche Gebrauchsanweisung.