

HYGIENISCHE WIEDERAUFBEREITUNG RC-MASKE TRACHEOSTOMA FÜR TRACHEOTOMIERTE PATIENTEN

Die RC-Maske Tracheostoma (Art.-Nr. 3012) ermöglicht Patienten mit offenem Tracheostoma das physiotherapeutische Training mit dem RC-Cornet®. Die RC-Maske Tracheostoma ist für den Mehrpatientengebrauch geeignet. Vor einem Patientenwechsel muss die RC-Maske Tracheostoma sterilisiert werden.

1 REINIGUNG UND DESINFEKTION

- 1.1 Geben Sie die RC-Maske Tracheostoma in die Instrumentenspülmaschine.
- 1.2 Wählen Sie das 93°C-Programm (Einwirkzeit 5 Minuten). Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, beachten Sie bitte die Dosierungsanweisung des Herstellers. Alle Reinigungsmittel aus der VAH-Liste können in Verbindung mit der RC-Maske Tracheostoma verwendet werden.
- 1.3 Überschüssiges Wasser ausschütteln und Teile an der Luft trocknen lassen.

2 STERILISATION

- 2.1 Verstauen Sie die RC-Maske Tracheostoma in einer dafür vorgesehenen Sterilisationsverpackung.
- 2.2 Die RC-Maske Tracheostoma kann nach dem folgenden Verfahren sterilisiert werden: 134°C für 3 Minuten.